

TRÆNING MED MODAK-APP

Følg 4 trin for at starte din træning:

1) Find MODAK-appen hvor du finder dine andre apps.

Tryk på:



2) Log ind med disse informationer

E-mail:

navn@gmail.com

Password:

navnkodeord123




Husk mig på denne enhed

3) Tryk på



4) Start træningen ved at trykke på

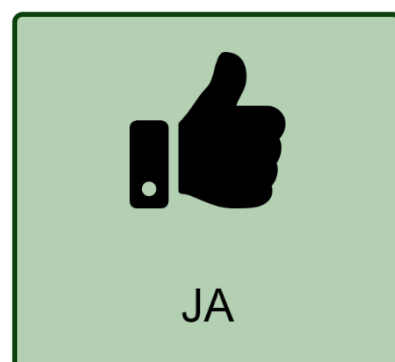

Knapper i MODAK-app

Der findes 4 knapper i MODAK-appen.



Afslut træning



Sæt træning på **pause**



Hør **sætning** igen



Hør **hvad du skal** i opgaven

Til pårørende/logopæd:

Gør følgende to ting i den nævnte rækkefølge:

- 1) Tilføj appen til hjemmeskærmen. Læs hvordan på www.modak.dk under *Tekniske forudsætninger*.
- 2) Klik "husk mig på denne enhed" ved første login. Så undgår brugeren at skrive login hver gang.